

DECHRA RING®

Odpowiedzialne stosowania antybiotyków.
Łatwiejsze, szybsze i dokładniejsze
oznaczanie antybiotykowrażliwości.



CONNECTED BY CARE®

MASTITIS



- ⊕ Szybka i łatwa w użyciu metoda
- ⊕ Dokładnie określone wielkości stref zahamowania
- ⊕ Minimalne ryzyko popełnienia błędu



SZYBKA I ŁATWA
W UŻYCIU
METODA



DOKŁADNIE
OKREŚLONE
WIELKOŚCI STREF
ZAHAMOWANIA



ODPOWIEDZIALNE
STOSOWANIE
ANTYBIOTYKÓW

Oznaczenie antybiotykowrażliwości jest niezbędne do prawidłowego zarządzania problemem mastitis, a co za tym idzie dobrania odpowiedniego leczenia i oceny jego skuteczności. Z nowym narzędziem - **Dechra Ring** - może to być teraz szybsze i łatwiejsze.


Dechra Ring to papierowy pierścień nasączony określonymi stężeniami antybiotyków o wąskim spektrum działania, służący do oznaczania antybiotykowrażliwości in vitro bakterii najczęściej izolowanych z próbek mleka z ówczarek objętych procesem zapalnym. Metoda diagnostyczna opiera się na klasycznej metodzie krążkowo-dyfuzyjnej z zastosowaniem rekomendacji EUCAST.

Tabele interpretacji wyników opracowano zgodnie z kryteriami międzynarodowymi opublikowanymi przez EUCAST, uzupełnione o standardy CLSI.

Zalety metody z zastosowaniem Dechra Ring


Metoda klasyczna

- Wymaga dobrania odpowiedniego panelu krążków
- Krążki nakładane na płytkę pojedynczo za pomocą pęsety lub dyspensera
- Nakładające się strefy zahamowania utrudniają dokładne odczytanie wyników

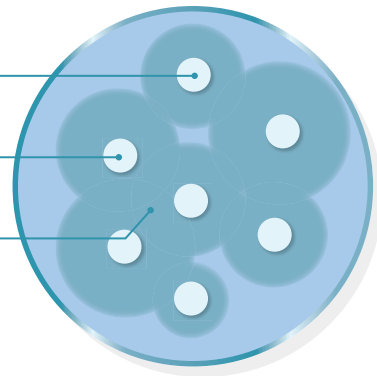


Dechra Ring

- Gotowy panel opracowany przez ekspertów (G-/ G+)
- Łatwe i szybkie umieszczenie na podłożu
- Nie wymaga kosztownego dyspensera

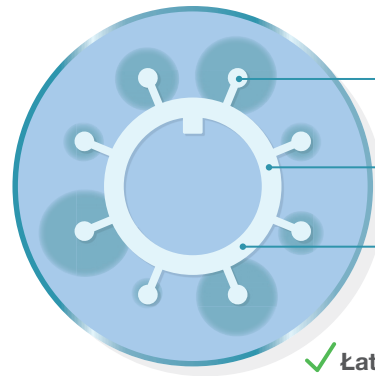

✔ Łatwy ✔ Szybki ✔ Dokładny

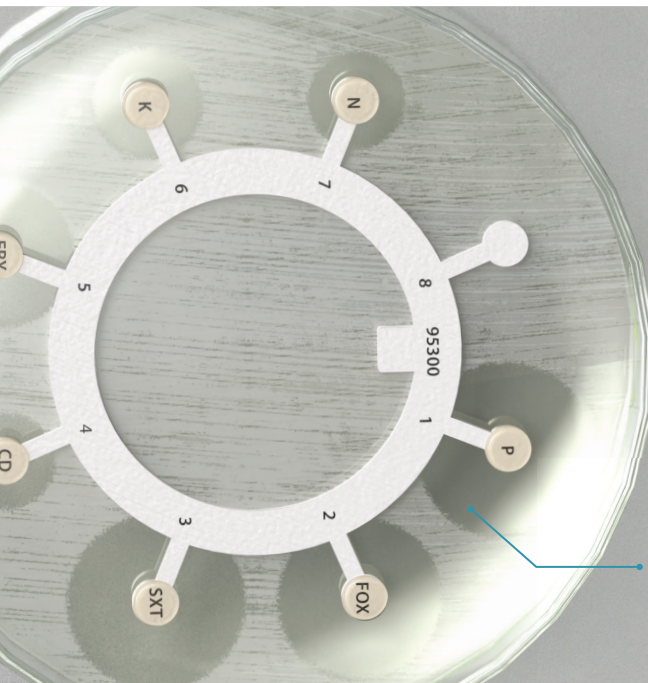

Prawidłowo dobrany antybiotyk

Dwa panele antybiotyków, jeden dla bakterii G+, drugi dla bakterii G-, opracowane przez ekspertów. Wsparcie ukierunkowanego podejścia do problemu zapaleń wymienia w stadach krów mlecznych.

Panel dla bakterii G-

- AMP** = Ampicylina
- CTX** = Cefotaksym
- SXT** = Trimetoprim+Sulfametoksazol reprezentuje wszystkie połączenia trimetoprimu z sulfonamidami
- Pusty (Blanco)**
- K** = Kanamycyna
- N** = Neomycyna
- ENR** = Enrofloksacyna

Panel dla bakterii Gram+

- P** = Penicylina
- FOX** = Cefoksytyna
- SXT** = Trimetoprim+Sulfametoksazol (reprezentuje wszystkie połączenia trimetoprimu z sulfonamidami)
- CD** = Klindamycyna (reprezentuje pirlimycynę i linkomycynę)
- Ery** = Erytromycyna (reprezentuje tylozynę)
- K** = Kanamycyna
- N** = Neomycyna

Przykładowy wynik dla *S. aureus*: wrażliwy: penicylina i cefoksytyna, oporny: klindamycyna. Leczenie: penetamat – Revozyn RTU podany ogólnie w połączeniu z tubą podaną dowymieniowo.

Zacznij sotosować Dechra Ring

Aby uzyskać więcej informacji i/lub zamówić Dechra Ring, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Dechra:

Magdalena Podsobińska 721 555 662
Maciej Trudnowski 726 555 663

Więcej informacji na temat Dechra Ring znajdziesz na naszej stronie:

 dechra.pl/dechring
dechra.pl/mastitis

Wygodne opakowanie zawierające 10 saszetek po 10 pierścieni papierowych w każdej saszetce



CONNECTED BY CARE®

Łączy nas troska

Nasza linia produktów dla bydła Connected by Care została stworzona, aby wspierać lekarzy weterynarii w ich codziennej praktyce. Wraz z lekarzami weterynarii i hodowcami zwierząt dzielimy troskę o te same wartości.

Troska o zwierzęta. Troska o zdrowy biznes. Troska o odpowiedzialne stosowanie antybiotyków.


Dechra
Veterinary Products